



"ЯНЕВ-ДЕНТАЛ" ЕООД

дентал

www.yanев-dental.bg

Представяне на продуктите "ROCANAL"

ROCANAL R1 IMEDIAT

Лубрициращ и дезинфектиращ крем. Лубрициращото действие на Rocanal R1 Imediat улеснява навлизането в кореновите канали дори, когато те са извити и усукани.



По време на инструментацията

Rocanal R1 Imediat дезинфекцира дори, когато има кръв, гной и т.н.

Rocanal R1 Imediat може да се остави в канала за лечение между посещенията в кабинета.

Rocanal R1 Imediat се понася много добре ако случайно попадне отвъд апекса.



В извити канали може да бъде много трудно да се достигне апекса. Употребата на лубрицираща агент спомага за навлизането в кореновите канали към апекса и помага за избягването на перфорации и корнизи.



Пилите трябва да бъдат изкривени и потопени в крема преди употреба. Когато канала е готов за финалното запълване, премахнете Rocanal R1 Imediat като просто го изплакнете с Rocanal Irrigation или стерилна вода.

Предимства при използване на Rocanal R1 Imediat в ендодонтското лечение:

1. Незабавно разтваряне на всичката некротична тъкан, дори при наличието на органични остатъци (кръв, гной), в киселинна или алкална среда.
2. Лубрициращо действие при работа с каналните инструменти.
3. Идеално за интермедиарна подготовка на гангренозни канали.
4. Не дразни периапикалните тъкани.
5. Ниска токсичност.
6. Лесно се поставя и се премахва (разтворим с вода).
7. Не е неприятно нито е опасно (не е каустик).
8. Не обезцветява или оцветява зъба.
9. Дезодориращо действие.

ROCANAL IRRIGATION SOLUTION

Ампули с разтвор за дезинфекция и почистване за еднократна употреба. Rocanal Irrigation дезинфекцира, почиства, лубрикира и изплаква канала наведнъж. Той не дразни и не причинчва подуване и болка. Неговата опакова изпълнява всички изисквания, за да предотврати взаимно замърсяване



> Не оставя петна

- > Ниско повърхностно напрежение.
- > Прониква лесно в канала.
- > Фунгицидно, бактерицидно, детергентно, деодориращо действие; ефективно дори при наличие на кръв, гнойни некротични тъкани и тънко кристално покритие.
- > Създава перфектни условия за финално запълване
- > Безопасен за оралната мукоза; няма болка ако има контакт с периодонтални тъкани
- > Употребата на Rocanal Irrigation е безопасна
- > Хидро алкохолен разтвор
- > Съхне бързо в канала
- > Не обезцветява зъба

Инструкции

Просто използвайте стандартна анестетична спринцовка с игла.

ROCANAL R2 PERMANENT VITAL



След жива пулпектомия всяко останало пулпарно парче, особено в спомагателните канали може да дегенерира с последваща некроза и вторична инфекция.

Това може да доведе до провал на ендодонтското лечение.



Rocanal R2 Permanent vital е материал за финално запълване. Неговото уникално действие се състои в неутрализация на замърсявания и протеинова декомпозиция особено при анаеробни условия.



Правилното крайно запълване достига анатомичния форамен.



Rocanal R2 Permanent vital позволява формирането на остео-цимент, който запечатва биологически апекса.



Пилата трябва да спре при анатомичния форамен или при дентин-циментната връзка.



Преминаването отвъд апекса може да причини болезнена пост оперативна реакция.

Свойства:

- > Съдържа орто фенил фенол
- > Предотвратява декомпозицията на пулпарните остатъци
- > Стабилен обем
- > Напълно запечатва канала
- > Резорбира се ако попадне отвъд апекса
- > Биосъвместим, не дразни тъканите
- > Няма олово, няма сребро
- > Не съдържа токсични съставки

ROCANAL R3 PERMANENT GANGRENE



Rocanal R3 Permanent gangrene предотвратява провалите при ендодонтското лечение, причинени от присъствието на бактерии. Rocanal R3 Permanent gangrene е финален ендодонтски цимент, който предотвратява размножаването на бактериите и вторични периапикални усложнения.



По време на преактивния период, активните съставки проникват на около 2 mm в страничните канали и дентина.



Ако излишъкът от цента проникне отвъд апекса, той се понся добре и се абсорбира от макрофагите. Отвъд апексът Rocanal R3 Permanent gangrene се толерира добре. Rocanal R3 Permanent gangrene бавно резорбира ако попаден след апекса.

Свойства:


- > Съдържа орто фенил фенол
- > Бактерициден иfungициден
- > Стабилен обем
- > Отлични запечатващи свойства
- > Абсорбираме след апекса
- > Биосъвместим, не дразни тъканите
- > Няма олово, няма сребро
- > Не съдържа токсични съставки

Състав на продуктите от серията "ROCANAL"

Rocanal R1 Imediat Крем	PVP-I complex (Povidone Iodine) Polyethylene Glycol, Water	кутийка 15 g
Rocanal R2 Permanent vital Ендодонтски цемент	Liquid: alcoholic eugenol solution Powder: Zinc Oxide, Titanium Oxide OPP (OrthoPhenylPhenol) Calcium Wolframate	5 ml 8 g
Rocanal R3 Permanent gangrene Ендодонтски цемент	Liquid: alcoholic eugenol solution Powder: Zinc Oxide, Titanium Oxide OPP (OrthoPhenylPhenol) Nitrofurazone Calcium Wolframate	5 ml 8 g
Rocanal Irrigation Хидро алкохолен разтвор	Benzethonium chloride Phenoxyethanol EDTA	Ампули 50x1.8 ml

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И УПОТРЕБА на Rocanal R2 и R3

1. Използвайте стерилна плочка за смесване и две еластични стерилни шпатули с единичен край (една за пудрата, една за миксиране).
2. Сложете една или две капки от течността и малко количество пудра върху плочката.
3. Смесете бавно пудрата и течността с известен натиск на шпатулата.
4. Миксирайте докато се получи кремообразна смес, без кристали (кристалите в пудрата се разтварят от течността).
5. Продължете с вашата обичайна техника на пълнене.

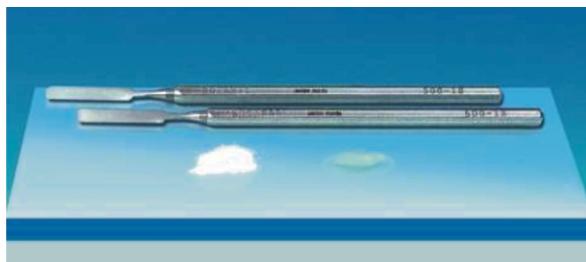

Производител : Medirel SA, Швейцария

Вносител : Янев-Дентал ЕООД

Стара Загора
ул."Св.Богородица" №100
тел.: 042 603 287
GSM: 0888 334 003
e-mail:petaragx@abv.bg

Представителства:
София
кв.Манастирски ливади
ул."Родопски извор"59Г
GSM: 0887 252 282

Бургас
GSM: 0879 533 869

www.yanев-dental.bg