

DENTIRO Wipes

ПРОДУКТ:	DENTIRO WIPES Почистващи и дезинфекциращи кърпички за малки повърхности, инструменти, медицинско оборудване и повърхностите на стоматологичните участъци. Без алдехиди.
УПОТРЕБА:	Отворете пълнителя и го поставете в контейнера. Издърпайте първата кърпичка през отвора на капака. Навлажнете напълно повърхностите и обектите с кърпичките и изчакайте да подейства. Използвайте само върху алкохол-съвместими материали. Затваряйте кутията след употреба.
СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:	<ul style="list-style-type: none">• Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM) секунди 30• Туберкулоцидно секунди 30• Хепатит В вкл. HIV минути: 2• Хепатит С секунди 30• Коронавирус (SARS) секунди 30
СЪСТАВ В 100 г.:	31.3g ethanol, 16.7g 2-propanol, 0.09g quaternary ammonium compounds
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:	Прозрачна безцветна течност с характерен алкохолен аромат. Точка на Възпламеняване: 22°C (DIN 51 755) плътност (20°C) ~0.915 g/ml (g/cm ³)
ТОКСИЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:	LD ₅₀ – Стойност: >5000 mg/kg /1/2 летална доза/
РЕГИСТРАЦИЯ:	CE 0483 Germany: DGHM listed
СРОК НА ГОДНОСТ:	24 месеца от датата на производство.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:	R10 Запалимо. S2 Да се пази от деца S16 да се пази далеч от източници на възпламеняване. Да не се пуши S 24/25 Избягвайте контакт с кожата и очите Съхранявайте на сухо и провентриро място.
ОПАКОВКИ:	120 кърпички в опаковка
УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ:	Инструкции за безопасно поддържане - Инструкции за защита срещу пожар и експлозия: По време на работа с продукта може да се отделят запалими летливи компоненти. Изпаренията могат да причинят експлозия в комбинация с въздуха. Дръжте настрана всякакви източници на възпламеняване. Не пушете. Изисквания за избора на складово помещение и контейнера - Допълнителни напътствия за условията на съхранение: Дръжте контейнера плътно затворен. Съхранявайте при стайна температура.

