

Sekusept® Pulver Classic



Всеки използван инструмент в медицинската практика се счита за контаминиран. Остатъците от кръв, белтък, тъкани и др. налагат сигурно почистване и дезинфекция. **Sekusept® Pulver Classic** е високо ефективен почистващ препарат за медицински инструментариум с дезинфекциращо действие. В състава му е включен биологично разграждащ се кислороден активатор, както и инхибитори на корозията.

Спектър на действие: Срещу бактерии (вкл. Tbc), гъбички, вируси: HBV, HIV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, Парова, Polio.

АДВ: Peroцетна киселина – източник на активен O₂ (образува се in situ).

Област на приложение:

Препаратът е предназначен за мануално почистване и дезинфекция на инструменти от метал, гума, стъкло, пластмаса, твърди ендоскопи, лабораторна стъклария. Приложим е и за почистване и дезинфекция на медицински вани.

Начин на употреба:

Препаратът се разтваря с вода (до 20°C), като първо се налива водата и после се добавя праха. Разбърква се и се изчаква около 15 мин. (Peroцетната к-на се образува in situ). Веднага след употреба, инструментите се *потопят* в разтвора на **Sekusept® Pulver Classic**. Задължително те трябва да бъдат потопени изцяло. След препоръчаното експозиционно време за съответната концентрация, се изваждат и се изплакват обилно с вода. Следва механично почистване (в повечето случаи не е необходимо), подсушаване, сортиране и термична стерилизация (окончателна дезинфекция, респ. студена стерилизация за термолабилни материали). Работния разтвор се сменя ежедневно, като през това време се използва многократно. Почистването и дезинфекцията на медицински вани се извършва чрез *забърсване*.

Приложение	Концентрация		Време на въздействие	
	%	g/L		
Дезинфекция на инструменти съгл. VAN (DGHM) при чисти и мръсни условия, бактерициден и фунгициден	2,0	20	60 мин.	
	4,0	40	15 мин.	
Туберкулоциден (активност срещу M. Terrae)	5,0	50	120 мин.	
Вирусоциден:				
➤ Ограничено вирусоциден (HIV, HBV, HCV)	2,0	20	15 мин.	
➤ Вирусоциден:				
Rota	1,0	10	60 мин.	
Adeno	2,0	20	15 мин.	
Polioma (SV40)	2,0	20	5 мин.	
Polio	2,0	20	120 мин.	
Дезинфекция на повърхности съгл. VAN (DGHM) срещу бактерии и дрождеподобни гъбички	чисти условия	1,5	15	60 мин.
		0,5	5	240 мин.
	мръсни условия	1,5	15	60 мин.
		1,0	10	240 мин.