

# OROCID – MULTISEPT plus

**ПРОДУКТ:**

OROCID – MULTISEPT plus  
Дезинфекциращ и почистващ концентрат за инструменти, борери и  
ендодонтски инструменти. Силно почистващо действие. Съдържа  
инхибитори на корозията (съдържа вещества, предпазващи инструмента от  
корозия). Без алдехиди, фенол и корозивни амониеви хлориди.

**УПОТРЕБА:**

За дезинфекция на инструменти използвайте 2% воден разтвор за 60 минути,  
4% разтвор за 30 минути или 5% за 15 минути. Убедете се, че повърхността  
на обектите е напълно покрита от разтвора и че не е останал въздух в  
лухините на инструмента. Дръжте инструмента разглобен. След дезинфекция  
предметите да се изплакнат обилно с вода. (За последното изплакване се  
препоръчва дестилирана вода). Препаратът е подходящ за употреба в  
ултразвукови вани за почистване и дезинфекция. Подновявайте разтвора два  
или три пъти седмично в зависимост от степента на замърсеност на  
инструмента. Препоръчва се всекидневна смяна на използвания разтвор. Не се  
препоръчва за закални и алуминиеви части на инструментите.

**СПЕКТЪР НА  
ДЕЙСТВИЕ:**

- Бактерицидно, фунгицидно, MRSA (DGHM) 0.25% / 15 мин
- Туберкулоцидно (DGHM) 2% / 60 мин; 4% / 30 мин; 5% / 15 мин
- Хепатит В вкл. HIV 2% / 60 мин; 4% / 15 мин
- Хепатит С 0.5% / 5 мин
- Коронавирус (SARS) 0.25% / 15 мин
- Адено вирус 0.5% / 5 мин
- 2% / 60 мин

**СЪСТАВ:**

9.8 g Alkylamine, 4.2g Dialkylmethylpoly(oxethyl) ammonium propionate, помощни  
вещества

**ФИЗИЧНИ  
СВОЙСТВА:**

Прозрачна синя течност с характерен аромат.  
pH: концентрат: ca. 12.5  
2% разтвор: ca. 11

**ТОКСИЛОГИЧНА  
ИНФОРМАЦИЯ:  
РЕГИСТРАЦИЯ:  
СРОК НА ГОДНОСТ:  
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:**

плътност (20°C) ca. 1.02 g/ml  
LD<sub>50</sub> – Стойност: >1500 mg/kg  
1/2 летална доза/  
CE 0483 Germany: DGHM listed

36 месеца от датата на производство.  
R34 Причинява изгаряне S2 Да се пази от деца S26 При контакт с очите  
измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. S28 При контакт с  
кожата изплакнете обилно с вода. S37/39 При работа с препарата да се носят  
специални предпазни ръкавици, очила/маски за лице. S46 При поглъщане  
незабавно да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или  
стикета.

**ОПАКОВКИ:  
УСЛОВИЯ НА  
СЪХРАНЕНИЕ:**

1 литър, 2 литра, 5 литра, 10 литра  
Инструкции за безопасно поддържане  
Инструкции за защита срещу пожар и експлозия:  
Продуктът не е възпламеним.

Изисквания за избора на складово помещение и контейнера  
Планирайте подово покритие, устойчиво на алкални разтвори. Да се  
използват нетечащи съдове, поставени на земята.  
Съхранение заедно с други продукти

Допълнителни напътствия за условията на съхранение:  
Дръжте контейнера плътно затворен.  
Съхранявайте при стайна температура.

